

## **Інструкція з використання тест-набору для збору біологічного матеріалу (слини)**

### **1. Підготовка до збору зразка біологічного матеріалу**

1. Забір виконуйте зранку, натще . Не чистіть зуби, не жуйте жуйок, не паліть
2. Перед тестуванням припиніть вживання алкоголю, кави та чаю за **12 годин**
3. Перед початком збору ретельно **вимийте руки** з милом і висушіть.

### **2. Збір слини**

1. Відкрийте тест-набір та дістаньте стерильний контейнер для слини.
2. Відкрутіть кришку та прикрутіть лійку.
3. В контейнері вже є 1 мл реагенту, його **НЕ МОЖНА** виливати
4. Підготуйтеся до збору слини, зібравши її природним шляхом у роті (не використовуйте мокротиння чи інші домішки).
5. Наповніть контейнер, доки рівень слини (без бульбашок) не досягне позначки, зазначеної на контейнері (2 мл).
6. Зніміть лійку і **щільно закрутіть кришку контейнера**.
7. Обережно **перевірте контейнер 5–10 разів**, щоб слина добре перемішалась із розчином.

### **3. Пакування зразка**


1. Помістіть закритий контейнер у **пластиковий мішечок із застібкою**, що додається.
2. Вкладіть мішечок у фольгу. Відірвіть стрічку та заклейте
3. Запакуйте все у зовнішній транспортний пакунок, призначений для доставки.

### **4. Надсилання через Нову Пошту**

1. Знайдіть найближче відділення Нової Пошти
2. Надайте працівнику Нової Пошти:
  - Пакунок зі зразком.
  - Реквізити для доставки:
  - м. Львів, відділення Нової пошти №83.
  - Отримувач: ФОП Андрійчук О.С.
  - Телефон отримувача: +380976168744
  - Опис: **«пробірка для аналізу або Пробірка зі слиною (не інфекційна)».**
3. Збережіть **трек-номер** та повідомте його представнику компанії

**Конфіденційність:** Ваша інформація буде оброблятися відповідно до стандартів захисту персональних даних (GDPR).

**Застереження:** Якщо біологічний зразок буде зібрано з порушенням цієї інструкції, у недостатньому обсязі або неналежно запакований, дослідження провести неможливо, в такому випадку **сплачені кошти за дослідження не повертаються**; а Вам буде надіслано **повторний тест-набір без додаткової оплати**, щоб зібрати новий зразок.

 У разі питань звертайтеся:

**Email:** [info@humess.com](mailto:info@humess.com)

**Телефон:** +38 098 404 55 33