

Інструкція з використання тест-набору для збору біологічного матеріалу (слини)

1. Підготовка до збору зразка біологічного матеріалу

1. Забір виконуйте зранку, натще. Не чистіть зуби, не жуйте жуйок, не паліть
2. Перед тестуванням припиніть вживання алкоголю, кави та чаю за **12 годин**
3. Перед початком збору ретельно **вимийте руки** з милом і висушіть.

2. Збір слини

1. Відкрийте тест-набір та дістаньте стерильний контейнер для слини.
2. Відкрутіть кришку та прикрутіть лійку.
3. В контейнері вже є 1 мл реагенту, його **НЕ МОЖНА** виливати
4. Підготуйтеся до збору слини, зібравши її природним шляхом у роті (не використовуйте мокротиння чи інші домішки).
5. Наповніть контейнер, доки рівень слини (без бульбашок) не досягне позначки, зазначеної на контейнері (2 мл).
6. Зніміть лійку і **щільно закрутіть кришку контейнера**.
7. Обережно **перевірте контейнер 5–10 разів**, щоб слина добре перемішалась із розчином.

3. Пакування зразка


1. Помістіть закритий контейнер у **пластиковий мішечок із застібкою**, що додається.
2. Вкладіть мішечок у фольгу. Відірвіть стрічку та заклейте
3. Запакуйте все у зовнішній транспортний пакунок, призначений для доставки.

4. Надсилання через Нову Пошту

1. Знайдіть найближче відділення Нової Пошти
2. Надайте працівнику Нової Пошти:
 - Пакунок зі зразком.
 - Реквізити для доставки:
 - м. Львів, відділення Нової пошти №83.
 - Отримувач: ФОП Коваль Роман Ярославович
 - Телефон отримувача: +380977797793
 - Опис: **«пробірка для аналізу або Пробірка зі слиною (не інфекційна)».**
3. Збережіть **трек-номер** та повідомте його представнику компанії

Конфіденційність: Ваша інформація буде оброблятися відповідно до стандартів захисту персональних даних (GDPR).

Застереження: Якщо біологічний зразок буде зібрано з порушенням цієї інструкції, у недостатньому обсязі або неналежно запакований, дослідження провести неможливо, в такому випадку **сплачені кошти за дослідження не повертаються**; а Вам буде надіслано **повторний тест-набір без додаткової оплати**, щоб зібрати новий зразок.

 У разі питань звертайтеся:
Email: info@humess.com

Телефон: +38 098 404 55 33