

Інструкція з використання тест-набору для збору біологічного матеріалу (слини)

1. Підготовка до збору зразка біологічного матеріалу

1. Збір виконуйте зранку, натще . Не чистіть зуби, не жуйте жуйок, не паліть
2. Перед тестуванням припиніть вживання алкоголю, кави та чаю за **12 годин**
3. Перед початком збору ретельно **вимийте руки** з милом і висушіть.

2. Збір слини

1. Відкрийте тест-набір та дістаньте стерильний контейнер для слини.
2. Відкрутіть кришку та прикрутіть лійку.
3. В контейнері вже є 1 мл реагенту, його **НЕ МОЖНА** виливати
4. Підготуйтеся до збору слини, зібравши її природним шляхом у роті (не використовуйте мокротиння чи інші домішки).
5. Наповніть контейнер, доки рівень слини (без бульбашок) не досягне позначки, зазначеної на контейнері (2 мл).
6. Зніміть лійку і **щільно закрутіть кришку контейнера**.
7. Обережно **перевірте контейнер 5–10 разів**, щоб слина добре перемішалась із розчином.

3. Пакування зразка


1. Помістіть закритий контейнер у **пластиковий мішечок із застібкою**, що додається.
2. Вкладіть мішечок у фольгу. Відірвіть стрічку та заклейте
3. Запакуйте все у зовнішній транспортний пакунок, призначений для доставки.

4. Надсилання через Нову Пошту

1. Знайдіть найближче відділення Нової Пошти
2. Надайте працівнику Нової Пошти:
 - Пакунок зі зразком.
 - Реквізити для доставки:
 - м. Львів, відділення Нової пошти №83.
 - Отримувач: ФОП Леушина Л.О.
 - Телефон отримувача: +38 098 404 55 33
 - Опис: **«пробірка для аналізу або Пробірка зі слиною (не інфекційна)»**.
3. Збережіть **трек-номер** та повідомте його представнику компанії

Конфіденційність: Ваша інформація буде оброблятися відповідно до стандартів захисту персональних даних (GDPR).

Застереження: Якщо біологічний зразок буде зібрано з порушенням цієї інструкції, у недостатньому обсязі або неналежно запакований, дослідження провести неможливо, в такому випадку **сплачені кошти за дослідження не повертаються**; а Вам буде надіслано **повторний тест-набір без додаткової оплати**, щоб зібрати новий зразок.

 У разі питань звертайтеся:
Email: info@humess.com
Телефон: +38 098 404 55 33